


Mi-Rhythm

Tek kanallı Holter Kayıt Cihazı

Hızlı Kılavuz

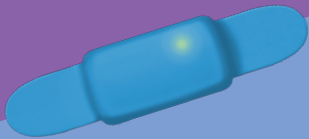

Kutu İçeriği



Ana Ünite



Elastik kılıf



Yapışkan ped



Şarj Standı



OTG Adaptör



USB Kablosu



Kullanım Klavuzu

Uygulama İndirme Linki
www.dakik.app/store



Mi-Rhythm Tek kanallı Holter Kayıt Cihazı

Hızlı Kılavuz

Dakik.app

Desteğiniz için teşekkür ederiz. Kullanım esnasında sorularınız olursa lütfen bu Hızlı Kılavuzdan destek alınız.

Güvenlik Uyarısı

1. Lütfen kayıt cihazınızı ve aksesuarları sökmeyiniz, tamir etmeyiniz veya değiştirmeyiniz.
2. Kayıt cihazınızı yüksek sıcaklık, basınç, gaz ve buharlı ortamlarda bırakmayınız, suya sokmayınız.
3. Bu cihazın ölçüm bilgileri yalnızca doktorun teşhisine dayanır.
4. Cihaz ile gelen orijinal aksesuarları kullanınız, bunun aksi bir durumda ölçüm sonucu etkilenebilir veya cihaz ölçüm yapamayabilir.
5. Kayıt cihazınızı kuru bir ortamda saklayınız, ıslak ortamlardan ve ani çarpmalardan uzak tutunuz.
6. Eğer malzemeler yanlışlıkla ıslanırsa cihazı kullanmayı bırakınız, cihazın üzerini kurularıp üretici ile iletişime geçiniz.
7. Takip esnasında, hızlı ve güçlü hareketleri azaltınız, özellikle de üst bedenle yapılan yoğun egzersizler ölçüm kalitesini etkiler.
8. Takip esnasında, terlemekten kaçınınız, terleme ECG elektrotlarını ve teni etkileyerek ölçüm kalitesini etkiler.

Feragat

Aşağıdaki durumlar meydana geldiğinde cihaz, garanti kapsamından çıkar.

1. Talimatlara uyulmadığı için cihaz kullanımında meydana gelen zararlar.
2. Cihazın, kullanıcı tarafından değişikliğe uğratılmasından meydana gelebilecek zararlar.
3. Çevresel koşullar sebebiyle cihazda meydana gelebilecek zararlar.
4. Anormal dış etkenler sebebiyle cihazda meydana gelebilecek zararlar.
5. Doğal afetler veya diğer mücbir sebeplerle cihazda meydana gelebilecek zararlar.

6. Cihazı parçalara ayırmaktan dolayı ortaya çıkan zararlar.

7. Satın alıma dair makbuzun kaybolması.

Cihazın Takılması

! Not: Cihazı takmadan önce yeterli sarji olduğundan emin olunuz, bu uzun süreli ECG takibi için gereklidir.

1. Cildi temizleyiniz.

Cihazı takmadan önce ECG sensörünün (cildi ıslak bir kumaş veya pamukla siliniz veya gerekiyorsa cildi traş edip sabun ile yıkayınız) sinyal alım kalitesi için cildi temizleyiniz. Cilt kuruduktan sonra cihazı takınız.

2. ECG sensörünü Takınız.






! Not: ECG sensörünü takmadan önce, kayıt cihazının açık olduğuna emin olunuz.

- ECG sensörünün ortasındaki kağıdı çıkarınız, ikiiletken kontaklı göreceksiniz.

- ECG sensörünün iki kontaklı arasına cihazın iki kontaklı hizalayınız ve elinizle nazikçe dış yüzeyinden bastırarak ECG sensörünün tamamen yerleştiğine emin olunuz.

- ECG sensörünün arkasındaki transparan kağıdı çıkarınız.

- ECG sensörünü vücut pozisyonlarından birine yapıştırınız, kayıt cihazının üzerindeki "ışık göstergesi" kişinin sağ tarafında olmalıdır.

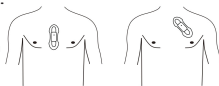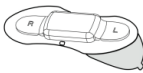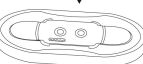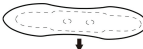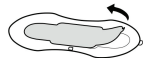


- Sensörün ön yüzünün ucundaki kağıdı çıkarınız.

! Not: Kayıt cihazının doğru konumlandırıldığına emin olunuz.

! Not: Vücuda yapıştırılken cildi sıkımayınız ve doğal halinde kalınız.

! Not: Aynı pozisyona birkaç kez yapıştırmayınız, başka bir pozisyona yapıştırınız veya pozisyonu hafifçe ilerletiniz.

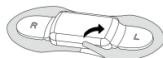

Sorun Çözme

1. Kayıt cihazı nasıl kapanır?

A: takibi durdurun, ECG takip arayüzünden çıkın, 5 dakika sonra kayıt cihazı otomatik olarak kapanır.

2. Kayıt cihazı açılmadan vücuda takılırsa ne yapmalıyız?

A: Vibrasyon yaratmak için birkaç parmağınızla cihazı sallayınız ve yeşil işığı açınız.

3. Veri aktarımında sorun.

A: genellikle bu sorun zayıf bağlantıdan dolayı meydana gelir. Cihazın sarj kutusuyla etkin bağlantısı olduğundan emin olunuz.

4. Sarj kutusunun üzerindeki üç gösterge ne anlama geliyor?

A: görselde görüldüğü üzere Gösterge 1 Yanan ışık veri transferini gösterir. Gösterge 2 Sürekli yanan ışık sarj dolunun devam ettiğini gösterir. Gösterge 3 Sürekli yanan ışık sarj dolunun bittiğini gösterir.

5. Kayıt cihazının üzerindeki gösterge durumu nasıl ayırt edilir?

A: Yeşil ışık: cihazın açık olduğunu gösterir. Hızlı yanan yeşil ışık: Bluetooth bağlantısının başarılı olduğunu gösterir. Mavi ışık: kayıt cihazının kayıta olduğunu gösterir. Kırmızı ışık: cihaz sarjının azaldığını gösterir.



Cihaz Özellikleri

1. Güvenlik

Elektirik Şok dalgasına karşı dayanıklılık	Dahili güç ekipmanı
Oksijen zengin alanlarda kullanıma uygunluk	Kategori yok AP / APG ekipmanı
Çalışma modu	Sürekli Çalışma
EMC	Grup1, SınıfB
Hasta / Kaçak Akım	Normal durumu: ≤0.01mA Hata durumu: ≤0.05mA
Evde / Kaçak Akım	Normal durumu: ≤0.1mA Hata durumu: ≤0.5mA

2. Boyut ve Kütle

Model	Mi-Rhythm
Boyutlar	45mm*25mm*7.5mm, ±0.5mm
Kütle	10±2g

3. Çevresel Çalışma Şartları

	Saklama ve Taşıma	Çalışma
Sıcaklık	-20 °C~+55 °C	+5°C ~ +40°C
Nem	25%~93% (non-condensing)	25%~80% (non-condensing)
Atmosfer Basıncı	700hPa ~1060hPa	860hPa ~1060hPa

4. Performans

Kayıtedici	Kanallar	Tek kanal
	Kayıt	Tam açıklama, veri sıkıştırması yok
	Data Aktarımı	Blue-tooth
	İlerleme	5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV, ±5%
	Örnek Oran	128 samples/channel/second
	A/D Kararlılık	12bit
	Giriş Empedansı	≥20MΩ
	CMRR	≥60dB

5. Güç gereksinimi : Güç: 3.7V d.c 120mAh (Li-ion Polimer Pil)

Uygulamayı indirmek için aşağıdaki QRCode'u okutarak "https://dakik.app/store" linkine girebilirsiniz.

Uygulama İndirme Linki
www.dakik.app/store



Onaylanmış kuruluş
CE işareti

Onaylanmış Kuruluş Id No: 0123
TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GmbH

İtalatçı Firma Bilgileri

Firma Adı: Map2heal Sağlık Turizmi ve Yazılım Ltd Şti
Adres: Hacettepe Teknokent 4. Arge Binası No 35 /Çankaya Ankara Turkey
Telefon: +90 (850) 532 6249,
E-mail: info@map2heal.com
Web Adresi: www.map2heal.com

Üretici Firma Bilgileri

Firma Adı: RENCARE CO.,LTD.
Adres: #715/716/718, 7/F, Bldg A, No. 1003, Xin'an 6th Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China
Posta Kodu: 518133
Telefon: +86-755-21632806
Fax: +86-755-21632806
Web Adresi: www.rencaremedical.com